


V-Veil UP2™ KIT 1.3

V-Veil UP2™ ve UP2 Retrofitter™ tüp

Lütfen talimatları okuyun ve bu broşürü saklayın

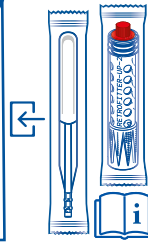

KİT'te bulunan cihazın nasıl kullanılacağına dair İngilizce videoyu izleyin

V-Veil UP2™ KİTİ NEDİR VE NE ZAMAN KULLANILABİLİR?

V-Veil UP2™ KIT 1.3, laboratuvar testleri ile tanı koymak amacıyla vajinal boşluk ve servikte bulunan salgılar, çeşitli sıvılar ve maddelerin örneklenmesinde kullanılan bir kendi kendine numune alma işlem paketidir.

DİKKATI! Bu kit, kanama, hamilelik veya toksik şok sendromunun ardından sadece bir tıp uzmanının tavsiyesi üzerine kullanılabilir.

İÇİNDEKİLER:

- 1 adet UVC ile dezenfekte edilmiş, steril olmayan, 1. sınıf tıbbi cihaz V-Veil UP2™ Vajinal Tül Toplayıcı
 - 1 Kullanım talimatları
 - 1 UP2 Retrofitter Tüp
- Kite dahil olmayan bir zamanlayıcı gereklidir.

ÖNERİLER VE İPUÇLARI:

- Bu kiti kullanmadan önce ellerinizi yıkayın.
- Son 2 gün içinde cinsel aktivitede bulundaysanız kullanmayınız.
- Vajinal boşluğunuzu 48 saatten daha önce yıkadıysanız kullanmayınız.
- Kendi kendine numune alımından 48 saat önce diğer vajinal tedavilerden (ovül, jeller, kremler, kontraseptifler, dezenfektanlar, kayganlaştırıcılar) veya diğer vajinal prosedürlerden (sürrütü, vajinal tamponlar, vajinal mendiller, vajinal muayene) kaçınılmalıdır.
- Hamileyseniz veya vajinal boşlukta kan varsa bu tıbbi cihazı sadece doktorunuzun tavsiyesi üzerine kullanın.
- Tül vajinada 30 dakikadan fazla kalmaz ve kalmamalıdır, ancak çıkarmayı unutursanız, hatırladığınız anda çıkarın.
- Bir seferde yalnızca bir peçe kullanın.
- Tül emdirilmemiş olsa bile tekrar kullanılmamalıdır.
- Daha fazla tavsiye için doktorunuzla, jinekologunuzla veya eczacınızla konuşun.

BU ÜRÜNÜ KİMLER KULLANAMAZ?

Kadınlarda:

- hafif olsa bile ateşiniz veya grip benzeri semptomlarınız varsa.
- Toksik şok sendromu geçirmiş ve testi gerçekleştirmek için bir tıp uzmanından tavsiye almadıysanız.
- plastik malzemelere ve türevlerine alerjisi varsa.
- 18 yaşın altında olanlar ebeveynlerinin ve/veya bir tıp uzmanının izni olmadan kullanırsa.
- talimat sayfasını bizzat okumadıysanız.
- kanamanız varsa ve testi yaptırmak için bir tıp uzmanının tavsiyesi yoksa.
- Hamileyseniz ve testi yaptırmak için tıp alanında uzmanından bir tavsiyeniz yoksa.

TOKSİK ŞOK SENDROMU İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİ: Toksik şok sendromu (TŞS), çocukları, erkekleri ve kadınları (menstrüasyon olsun veya olmasın) etkileyebilen nadir bir enfeksiyondur. Normalde vücutta bulunan bir bakteri (stafilokok) tarafından üretilen bir toksinden kaynaklanır. Bugüne kadar kaydedilen TŞS vakalarının yarısı, adet sırasında ergen kızlarda ve kadınlarda meydana gelmiştir. Sendrom tampon kullanımı ile ilişkilendirilmiştir, ancak diğer koruyucu araçlar (emciler, astarlar...) kullanıldığında da ortaya çıkabilir. TŞS ölümcül olabilen bir enfeksiyondur ve bu nedenle erken teşhis edilip hemen tedavi edilmelidir. TŞS semptomları menstrüasyon sırasında veya hemen sonrasında aniden ortaya çıkabilir. Tüm semptomlar aynı anda ortaya çıkmayabilir ya da semptom olmayabilir; ani ateş (>39C), kusma, ishal, boğaz ağrısı, baş dönmesi, bayılma, kas ağrısı, güneş yanığı benzeri döküntü (cilt birkaç gün sonra soyulabilir). Bu belirtilerle karşılaşırsanız, hemen tülü çıkarmalı ve kişisel doktorunuza veya en yakın doktora başvurulmalıdır. TŞS, V-Veil UP2™ kullanımı ile veya kullanılmadan gerçekleşebilir. Daha önce bir SST geliştirdiyseniz, V-Veil UP2™ kullanmadan önce doktorunuza danışın. V-Veil UP2™'yi doğru şekilde kullanarak ve tavsiyelere uyarak toksik şok sendromu geliştirme riskini azaltacaksınız.

SAKLAMA ŞARTLARI:

İsı kaynaklarından uzakta, temiz ve kuru bir yerde saklayın.

OLAY RAPORLAMA

DİKKAT! Yasal bilgiler, göstergeler ve kısıtlamalar için sadece kullanım talimatları referans olarak kullanılabilir. Ambalajı hasarlıysa ve son kullanma tarihi geçmişse ürünü kullanmayınız. Üretim sürecinde aldığımız önlemlere rağmen, kusurlu bir ürün teslim aldığınıza inanıyorsanız, lütfen ürünü kullanmayın ve üretici veya distribütör ile iletişime geçerek, karşılaşılan sorunu ve paket üzerinde belirtilen parti sayısını açıkça belirtin. Cihazla ilgili olaylar, client@vvup.org e-posta adresi üzerinden üreticiye ve bulunduğunuz üye devletin yetkili makamına bildirilebilir. V-Veil UP2™ kiti, Avrupa Birliği'nin yürürlükteki hüküm ve gerekliliklerine uygun olarak üretilmiştir.

MD	Tıbbi Cihaz
CE	Avrupa Uygunluğu
STERIL	Steril olmayan
NO DAMAGE	Paket hasarlıysa kullanmayın
UMBRELLA	Kuru yerde saklayın
SUN	Direkt güneş ışığından uzak tutun
REPEAT	Tekrar kullanmayın
WARNING	Dikkat
BOOK	Açıklamayı okuyun
IVD	In-Vitro Teşhis
BOX	Çöpü bir çöp kutusuna atın
TOILET	Tuvalete atmayın

EN	FR	RO	DE	ES
IT	PT	AR	BG	HR
CS	DA	NL	ET	FI
HU	GA	LV	LT	MT
PL	SK	SL	SV	EL



Yetkili distribütör: ambalaj bilgilerine bakın.

Patent başvurusu yapılmıştır - Vajinal Tül Toplayıcı V-Veil UP2™

V-VEIL-UP PRODUCTION SRL


Clocanesti 280B Calinesti
117197 Arges ROMANIA
client@vvup.org
TEL : 0040 348 420 620

KULLANIM TALİMATI - ADIM 1


- 1** Ellerinizi yıkayın ve temiz bir havluyla kurulayın.




- 2** Kutuyu açın ve **V-Veil UP2™** yu bu amaç için özel olarak sağlanan kısımdan açarak ambalajından çıkarın. Kutuyu saklayın ve açılmış ambalajı normal ev atıklarınızla birlikte atın.

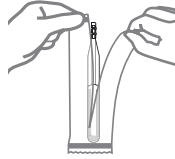



- 3** Aplikatörü parmaklarınızla ucundan (kavrama alanında) kavrayın. Rahatlayın ve size en rahat gelen pozisyonu seçin: bacaklarınızı ayırarak oturun, bir bacağınızı kaldırarak ayakta durun veya bacaklarınızı hafifçe bükerek ayakta durun. Dış dudakları ayırın ve **V-Veil UP2™** nun üst kısmını vajinaya yaklaştırın. Tülü aplikatörle yavaşça yerleştirin. Kavrama alanı vajinanın dışına çıkana kadar aplikatörle peçeyi hafifçe itmeye devam edin. "V" şeklindeki terminal kısım vajina dışına serbestçe asılmalıdır.

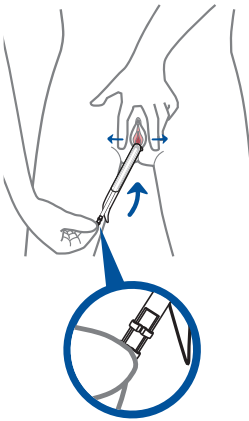

- 4** Aplikatörü çıkarmak için, tülü de çekmemeye dikkat ederek nazikçe dışarı çekin. Aplikatörü normal evsel atıklarla birlikte atın. **DİKKAT!** Vajinanın boyutuna ve vajina içine tülü nasıl taktığınıza bağlı olarak, kullanımdan sonra çıkarılması için "V" şeklindeki ucun görünür kalması gerekmektedir.

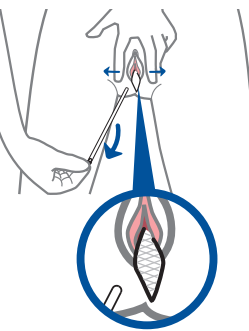


- 5** Vajinal boşlukta peçe takılı halde 2 dakika bekleyin.

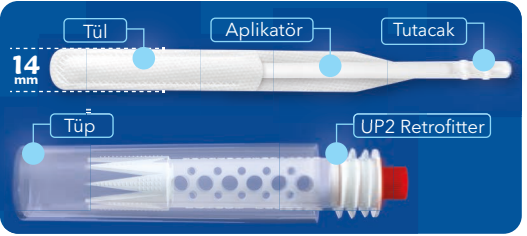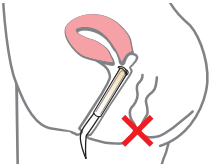


KULLANIM TALİMATI - ADIM 2

- 6** **V-Veil UP2™** tülünü çıkarmak için ellerinizi yıkayın ve temiz bir havluyla silin.

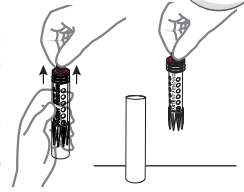


- UP2 Retrofitter™** tüpün kapağını açın ve elinizde tutun. Tüpü düz ve temiz bir zemine koyun.


- 7** Rahatlayın ve yukarıda belirtilenler arasından size en rahat gelen pozisyonu seçin. Tül, "V" şeklindeki terminal kısım çekilerek kolayca çıkarılır.

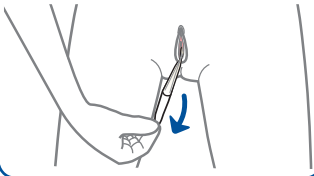

- 8** Numuneyi tüpün içine yerleştirin.

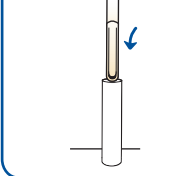

- 9** **UP2 Retrofitter™** kapağını, 3 kez "tık" sesi duyana kadar kapatmak için bastırın; bu esnada numune Retrofitter'ın duvarları ile tüp arasında kalacaktır.

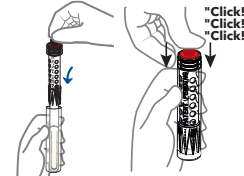

- 10** Alınan numunenin bulunduğu kabı temiz ve kuru bir yerde, güneş ışığından koruyarak saklayın. Doktorunuzun, eczacınızın veya size kendi kendinize numune almayı öneren uzmanın önerdiği adımları izleyin.

